



**系统设备表**  
<设备配置以最终合同为准>

编号	部件名称	重量	系统电缆
		(kg)	连接点
<b>以下部件由联影提供并安装</b>			
①.1	机架	2450	GAN
①.2	病床	556	Tab
①.3	PSC	408	PSC
①.4	操作台	---	---
①.5	主机柜	---	---
①.6	附件柜	---	---
①.7	3D摄像头	---	---

<b>以下部件由客户提供并安装</b>			
	现场配电箱/配电盘	---	RV
	射线指示灯	---	HL3
	紧急停止按钮 (带自锁)	---	AT

注: 为满足设备温湿度要求, 请客户根据实际情况配备独立空调 (扫描间内必备)、除湿机。

项目经理: 林智峰  
联系方式: 136 3232 3862  
E-mail: zhifeng.lin@united-imaging.com

**注意!**  
根据法律法规《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020 X射线设备机房 (扫描间):  
最小有效使用面积为30m<sup>2</sup>, 最小单边长度为4.5m。  
请用户咨询当地相关环境、卫生评价机构, 确保机房条件能满足环评与卫评的要求。

请客户阅读以下说明, 并签字确认此布局方案: (联影公司将据此方案进行设备的安装和调试。)

\*本机房的承重和布局符合要求, 该布局为最终方案。

\*已知悉本布局方案的各项提示。

最终用户: 林智峰 2025.9.26 林智峰  
姓名 日期 签字盖章

图号: 20250911B01-V01

制图 林智峰 审核 林智峰

上海联影医疗科技股份有限公司  
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

uCT 610sim  
GD广东省人民医院 (方案2)

布局

场地平面布局图

2/8